

# エドワーズライフサイエンス社製生体弁\* ウシ心のう膜パッチの取り扱い

\*対象製品は下記ご参照ください

## 受領時

- ・ 輸送ボックスに破損等、異常がないか確認してください。
- ・ 受領後すぐに温度表示器が「OK」となっていることを確認してください。



製品外観



温度表示器



蓄熱材

## 保管時

- ・ 輸送ボックスから製品を取り出し、10~25℃の乾燥した環境で保管してください。
- ・ 直射日光や高温・低温・高湿度に晒される場所での保管は避けてください。
- ・ 定温庫で保管する場合は10~25℃の範囲内の一定温度に維持して保管してください。
- ・ 庫内温度が10℃を下回る可能性があるため一般冷蔵庫による保管は避けてください。
- ・ 蓄熱材および保冷材(エスレン用)は、輸送時に入っている所定の場所から取り出さないでください。



輸送ボックス①



正



誤

注意:蓄熱材は所定の場所に入れてください。直接製品に触れさせることのないようにお願いします。

**注意** 蓄熱材および保冷材は、  
冷凍・加熱しないでください。



輸送ボックス②



正



誤

注意:蓄熱材は所定の場所に入れてください。直接製品に触れさせることのないようにお願いします。

## 輸送時

- ・ 弊社生体弁専用の輸送ボックスおよび蓄熱材を使用してください。
- ・ 出荷時に温度表示器が「OK」となっていることを確認してください。

**注意** 弊社への返却時には、輸送ボックス③  
(エスレン)はご使用しないでください。



輸送ボックス③(エスレン)



正



誤

注意:蓄熱材は所定の場所に入れてください。直接製品に触れさせることのないようにお願いします。

### <対象製品>

販売名	品番	承認番号
カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナEASE ThermoFix Process	3300TFX-XX	22300BZX00320
ウシ心のう膜パッチ	4700	22200BZX00841

- お願い**
- 週末・休日をまたいでの生体弁・心のう膜パッチの輸送は避けてください。
  - 生体弁専用の輸送ボックスは、エドワーズライフサイエンス株式会社の資産であり、シリアル番号管理をしております。早期返却にご協力ください。

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、エドワーズライフサイエンス、定型化されたEロゴ、Carpentier-Edwards、カーペンターエドワーズ、Magna、Magna EaseおよびThermoFixは、Edwards Lifesciences Corporation またはその関係会社の商標です。その他のすべての商標はそれぞれの商標権者に帰属します。

© 2023 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2023012

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社  
本社:東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 Tel.03-6894-0500  
edwards.com/jp



Edwards