


Capteur Acumen IQ

Guide d'installation

1. Mettre en marche le moniteur et connecter le câble de pression HemoSphere à la plateforme de surveillance HemoSphere.
2. Sélectionner la technologie **minimalement invasif**, puis sélectionner **Start Monitoring** (démarrer la surveillance).
3. Ouvrir l'emballage du capteur Acumen IQ et inspecter son contenu. Monter le capteur Acumen IQ sur une potence IV à l'aide du support approprié.
4. Pour éliminer l'air de la poche de rinçage de perfusion, inverser d'abord la poche de perfusion. Perforer la poche et maintenir la chambre compte-gouttes en position verticale. S'assurer que l'air a été évacué. Insérer la poche de perfusion dans la poche de pression et la suspendre à la potence IV (ne pas la gonfler).
5. Pour activer le capteur Acumen IQ :
Par gravité uniquement (sans pression dans la poche de pression), rincer le capteur Acumen IQ en tirant sur le dispositif Snap-Tab, tout en maintenant le tube de pression en position verticale jusqu'à ce que la colonne de liquide atteigne l'extrémité du tube.
6. Remplacer tous les bouchons par des bouchons non ventilés et s'assurer que tous les raccords sont bien serrés.

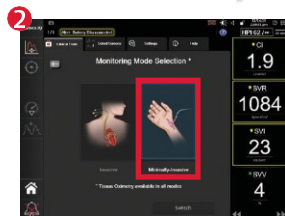

7. Pressuriser la poche de perfusion jusqu'à ce qu'elle atteigne 300 mmHG, puis rincer rapidement le capteur conformément à la politique de l'hôpital et tapoter le tube et les robinets d'arrêt pour éliminer toute bulle résiduelle.
8. Brancher le connecteur vert du capteur Acumen IQ au câble de pression HemoSphere.
9. Brancher le connecteur rouge du capteur Acumen IQ au câble de chevet.
10. Connecter le tube au cathéter artériel.
11. Placer le capteur Acumen IQ au niveau de l'axe phlébostatique. **Remarque : Il est important de maintenir le capteur Acumen IQ au niveau de l'axe phlébostatique à tout moment pour garantir la précision du débit cardiaque.**



12. Pour mettre à zéro, fermer le robinet d'arrêt vers le patient et laisser l'air s'échapper :
 1. Maintenir la touche zéro du câble de pression enfoncée pour faire apparaître l'écran zéro.
 2. Maintenir le bouton zéro enfoncé jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre pour terminer la mise à zéro.



ou

La mise à zéro peut également être effectuée en sélectionnant le bouton de **mise à zéro rapide** pour afficher l'écran de mise à zéro, puis en sélectionnant **Zéro**.



AVERTISSEMENT : La loi fédérale (États-Unis) prévoit que ce dispositif ne puisse être délivré que sur ordonnance médicale ou ne puisse être vendu que par un médecin. Veuillez consulter le mode d'emploi pour connaître l'ensemble des renseignements sur la prescription, y compris les indications, les contre-indications, les mises en garde, les précautions d'utilisation et les événements indésirables.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo E stylisé, Acumen, Acumen IQ et HemoSphere sont des marques de commerce d'Edwards Lifesciences Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. Tous droits réservés. PP-US-4567 v2.0

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 États-Unis • edwards.com

